





つかまり立ち サポートスタンド

商品コード: A0111A

持ち運びに
便利

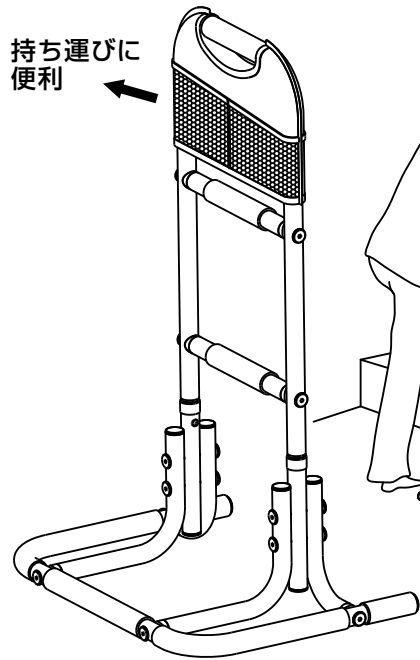


- 玄関のちょっとした段差に
- ベッドからの起き上がりに
- トイレのサポートに
- 立ち上がりのサポートに


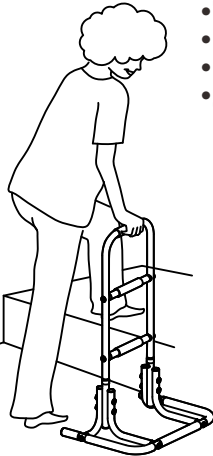


付属品

- ① パイプハンドル×1個
- ② パイプ土台×1個
- ③ ポケットポーチ×1個
- ④ 六角レンチ×1個

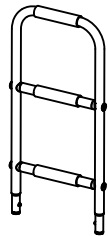

①パイプハンドル×1個

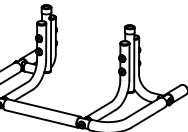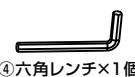


②パイプ土台×1個




③ポケットポーチ×1個


1

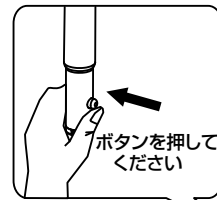


ボタンを押して
ください

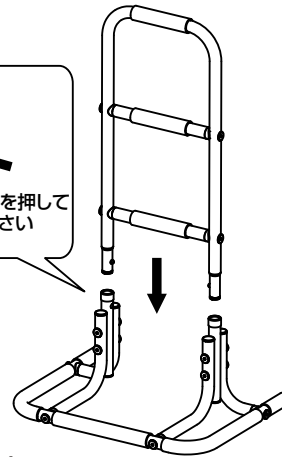

2

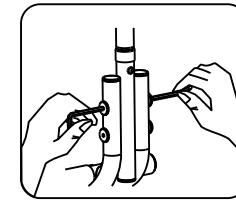

付属の六角レンチでネジを
しっかりと締めてください

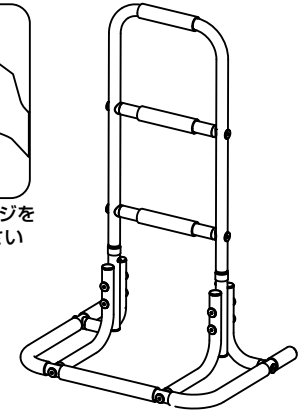

■組み立て方■

- 1.パイプハンドル下部の2つのボタンを押して土台に取り付けます。
- 2.しっかり装着され、ネジの緩みがないことを確認してください。


ネジに緩みがあれば、付属の六角レンチでしっかりと締めなおしてください。

製品が正しい向きか
確認の上ご使用ください



前

後

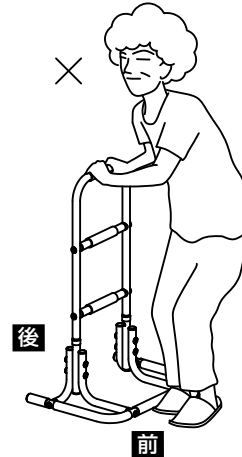

後

前

■使用上の注意■

- 1 製品が正しい向きか確認の上、ご使用ください。間違った向きで使用することは、大変危険ですので絶対にお止めください。
- 2 使用前に製品がしっかりと組み立てられているか確認してください。ネジの緩みなどがあれば付属の六角レンチでしっかりと締めなおしてください。

商品サイズ

本体:幅51cm×奥行37cm×高さ80cm
 ポケットポーチ:幅22cm×高さ33cm
 本体材質:アルミ/EVA/ナイロンクロス
 本体重量:約1.7Kg

販売元: **大阪漁具株式会社**

大阪府摂津市一津屋3丁目13番1号

MADE IN TAIWAN

■注意■

- 1 本製品の組み立て前に説明書をよく読んでください。
- 2 組み立て前にパーツがすべて揃っていることを確認して下さい。
- 3 最大耐荷重は、100Kgです。
- 4 小さなお子様の手が届かない所でご使用ください。
- 5 平らな床でのみご使用ください。
- 6 高温になる所での使用はご遠慮ください。
また、直射日光が当たる所に長時間放置しないようにご使用ください。
- 6 本製品は、立ち上がりや腰掛けを補助する為の製品です。
- 7 身体障害者や一人で立ち上がるのが困難なお客様は、お一人での使用は絶対にお止めください。
- 8 取り付け不良や間違った使い方で生じた事故や傷害に関して当社は一切責任を負いません。